 T.C. Sağlık Bakanlığı ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ	ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ FARAŞ SEDYE BAKIM VE KULLANIM TALİMATI			
Doküman No: İST.TL.10	Yayın Tarihi: 21.12.2009	Revizyon Tarihi: 30.09.2015	Revizyon No:03	Sayfa No: 1 / 2

1. AMAÇ

Faraş sedyenin kullanım ve bakım yöntemini belirlemeyi amaçlar.

2. KAPSAM

Faraş sedyenin kullanımını, dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Acil Yardım İstasyonu Çalışanları ve Ekip Sorumluları, sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI

6.1. Hastanın travmasının yeri saptanmalıdır ve sedye kilitliken, sedye boyu hastanın boyuna göre ayarlanmalıdır. Hasta kesinlikle yürütülmemelidir.

6.2. Uygulayıcılar sedye klemplerini açmalıdır, ekipmanı sırt tahtası konumuna getirmelidir.

6.3. Klempler kilitlenmelidir, sedye hasta yanına paralel uzatılmalıdır.

6.4. Sedyenin boy ayarlama klempleri açılmalıdır, hastanın boyu ayarlanmalıdır, sedyenin klempleri kilitlenmelidir.

6.5. Uygulayıcılar sedyenin baş ve ayakucuna geçmelidir, ayırma klemplerini açmalıdır.

6.6. Sedyenin yarısı uygun taraftan hastanın altına yerleştirilmelidir, hasta sedye üzerine yaklaştırılarak diğer yarısı da hasta altına yerleştirilir ve birbirine yaklaştırılmalıdır.

6.7. Sedyenin ayırma klempleri birleştirilerek kilitlenmelidir. (hasta sedyeye alındıktan sonra kemerleri sabitlenmelidir)

6.8. Uygulayıcıların sözlü emirleri ile (1.2.3 vb) sedye koordineli olarak kaldırılmalıdır.


6.9. Hastanın sırt kasları kepçe arasına sıkıştırılmamalıdır.

6.10. Sedyenin, baş ve ayakucundaki ayırma klemplerinin, taşıma sırasında açılmaması için özen gösterilmelidir.

6.11. Faraş sedye ile hasta alındıktan sonra, ana sedyeye yerleştirilmeli ve sabitlenmelidir; faraş sedye, uzun süreli taşımalarda kullanılmamalıdır ve kemerleri ile sabitlenerek ambulansa alınmalıdır.

6.12. Sedyenin taşıma kapasitesi 160 kg'dır ve üzerine çıkılmamalıdır.

6.13. Ambulans temizlik ve dezenfeksiyon talimatındaki öngörülen standartlarda yapılır.

 <p>TC Sağlık Bakanlığı ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ</p>	ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ FARAŞ SEDYE BAKIM VE KULLANIM TALİMATI			
Doküman No: İST.TL.10	Yayın Tarihi: 21.12.2009	Revizyon Tarihi: 30.09.2015	Revizyon No:03	Sayfa No: 2 / 2

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. Ambulans Ve Tıbbi Malzeme Temizlik Ve Dezenfeksiyon Talimatı (İST.TL.30)