 T.C. Sağlık Bakanlığı ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ	<b>ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ FARAŞ SEDYE BAKIM VE KULLANIM TALİMATI</b>			
Doküman No: İST.TL.10	Yayın Tarihi: 21.12.2009	Revizyon Tarihi: 30.09.2015	Revizyon No:03	Sayfa No: 1 / 2

## 1. AMAÇ

Faraş sedyenin kullanım ve bakım yöntemini belirlemeyi amaçlar.

## 2. KAPSAM

Faraş sedyenin kullanımını, dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini kapsar.

## 3. KISALTMALAR

## 4. TANIMLAR

## 5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Acil Yardım İstasyonu Çalışanları ve Ekip Sorumluları, sorumludur.

## 6. FAALİYET AKIŞI

**6.1.** Hastanın travmasının yeri saptanmalıdır ve sedye kilitliken, sedye boyu hastanın boyuna göre ayarlanmalıdır. Hasta kesinlikle yürütülmemelidir.

**6.2.** Uygulayıcılar sedye klemplerini açmalıdır, ekipmanı sırt tahtası konumuna getirmelidir.

**6.3.** Klempler kilitlenmelidir, sedye hasta yanına paralel uzatılmalıdır.

**6.4.** Sedyenin boy ayarlama klempleri açılmalıdır, hastanın boyu ayarlanmalıdır, sedyenin klempleri kilitlenmelidir.

**6.5.** Uygulayıcılar sedyenin baş ve ayakucuna geçmelidir, ayırma klemplerini açmalıdır.

**6.6.** Sedyenin yarısı uygun taraftan hastanın altına yerleştirilmelidir, hasta sedye üzerine yaklaştırılarak diğer yarısı da hasta altına yerleştirilir ve birbirine yaklaştırılmalıdır.

**6.7.** Sedyenin ayırma klempleri birleştirilerek kilitlenmelidir. (hasta sedyeye alındıktan sonra kemerleri sabitlenmelidir)

**6.8.** Uygulayıcıların sözlü emirleri ile (1.2.3 vb) sedye koordineli olarak kaldırılmalıdır.

**6.9.** Hastanın sırt kasları kepçe arasına sıkıştırılmamalıdır.


**6.10.** Sedyenin, baş ve ayakucundaki ayırma klemplerinin, taşıma sırasında açılmaması için özen gösterilmelidir.

**6.11.** Faraş sedye ile hasta alındıktan sonra, ana sedyeye yerleştirilmeli ve sabitlenmelidir; faraş sedye, uzun süreli taşımalarda kullanılmamalıdır ve kemerleri ile sabitlenerek ambulansa alınmalıdır.

**6.12.** Sedyenin taşıma kapasitesi 160 kg'dır ve üzerine çıkılmamalıdır.

**6.13.** Ambulans temizlik ve dezenfeksiyon talimatındaki öngörülen standartlarda yapılır.

<b>HAZIRLAYAN</b> Kalite Birimi Çalışanı	<b>KONTROL EDEN</b> Kalite Yönetim Direktörü	<b>ONAYLAYAN</b> Başhekim
---	---	------------------------------

 TC Sağlık Bakanlığı ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ	<b>ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ FARAŞ SEDYE BAKIM VE KULLANIM TALİMATI</b>			
Doküman No: İST.TL.10	Yayın Tarihi: 21.12.2009	Revizyon Tarihi: 30.09.2015	Revizyon No:03	Sayfa No: 2 / 2

## 7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. Ambulans Ve Tıbbi Malzeme Temizlik Ve Dezenfeksiyon Talimatı ( İST.TL.30 )

<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>	<b>ONAYLAYAN</b>
Kalite Birimi Çalışanı	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim