 TC Sağlık Bakanlığı ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ	ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ TRAVMA YELEĞİ (KED) KULLANIM TALİMATI			
Doküman No: İST.TL.14	Yayın Tarihi: 07.12.2009	Revizyon Tarihi 30.09.2015	Revizyon No:02	Sayfa No: 1 / 2

1. AMAÇ

Oturan yaralı hastalarda, spinal immobilizasyonu (sabitleme) sağlayabilmek için travma yeleğinin kullanım ve bakım yöntemini belirlemek.

2.KAPSAM

Travma yeleğinin kullanımı sırasında dikkat edilecek hususları ve bakım faaliyetlerini kapsar.

3. KISALTMALAR

4. TANIMLAR

5. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Acil Yardım İstasyonu Çalışanları ve Ekip Sorumluları, denetiminden Teknik Destek Birimi Tıbbi Alet Demirbaş Malzeme Çalışanı, Başhekim Yardımcıları ve Başhekim sorumludur.

6.FAALİYET AKIŞI

6.1. Bir kişi tarafından hastanın başının ve boynunun düz hat pozisyonu verilerek manuel tespit edilmelidir.

6.2. Servikal İmmobilizasyonun devamını sağlamak amacıyla ikinci kişi boyunluğuna takmalıdır. Bu arada manuel tespite devam edilmelidir.

6.3. Bacakları tutacak olan şeritler çözülmelidir ve her iki yana açılmalıdır.

6.4. Travma yeleği hastanın arkasına, omurga ortalanacak şekilde konulup yan kısımları koltuk altına yerleştirilmelidir.

6.5. Ortadaki şerit takılmalı ve çok fazla sıkıştırılmamalıdır.

6.6. Alttaki şerit takılmalı ve çok fazla sıkıştırılmamalıdır.

6.7. Üstteki şerit takılmalı ve çok fazla sıkıştırılmamalıdır.

6.8. Travma yeleği yanlardan tutularak, hastanın koltuk altlarında boşluk kalmayacak şekilde koltuk altlarına doğru yerleştirilmelidir.

6.9. Bacak şeritleri, içten dışa veya dıştan içe doğru olacak şekilde, bacakların altından geçirilerek klempler takılmalıdır ve sıkıştırılmalıdır.

6.10. Ortadaki şerit sabitleştirilmelidir.

6.11. Alttaki şerit sabitleştirilmelidir.

6.12. Üstteki şeritle hasta arasına, kurtarıcı elini koymalı, hastaya derin bir nefes aldırılmalı ve sabitlenmelidir.

6.13. Hastanın baş boyun bölgesi ile KED arasında boşluk kalmışsa, yastık ile boşluk doldurulmalıdır.


6.14. Hastanın baş boyunu sabitlenir ve bu aşamadan sonra manuel sabitleme bırakılmalıdır.

6.15. Hastaya derin bir nefes aldırılarak göğüs hizasındaki üst şerit takılmalıdır.

6.16. Hasta sırt tahtasına alınmalıdır.

6.17. Hasta travma yeleği bağlanmış, sırt tahtası ile ana sedyeye alınmalı, sırt tahtasının ve ana sedyenin kemerleri ile sabitlenmelidir.

6.18. Travma yeleği, arızalı olduğu tespit edildiğinde kesinlikle kullanılmamalıdır. Teknik Destek ve Ambulans Lojistik Birimine bilgi verilmelidir.

 TC Sağlık Bakanlığı ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ	ANKARA 112 İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ TRAVMA YELEĞİ (KED) KULLANIM TALİMATI			
Doküman No: İST.TL.14	Yayın Tarihi: 07.12.2009	Revizyon Tarihi 30.09.2015	Revizyon No:02	Sayfa No: 2 / 2

6.19. Travma yeleđi, tokalar ierde kalacak Őekilde, katlanmış olarak antasında muhafaza edilmesi ve kullanıma hazır olması gereklidir.

6.20. Ambulans Ve Tıbbi Malzeme Temizlik Ve Dezenfeksiyon Talimatında (İST.TL.30) ngrlen standartlarda yapılır.

7. İLGİLİ DOKMANLAR

7.1. Ambulans Ve Tıbbi Malzeme Temizlik Ve Dezenfeksiyon Talimatı (İST.TL.30)